



Skin Infrared Thermometer

비접촉 체온계 EISI-ODT-1A



비접촉(이마, 귀) 체온계

비접촉 체온계는 귀 및 피부를 통한 체온 측정이 모두 가능한 조합형 체온계입니다.
단, 1초! 빠르고 편리하게 비접촉 체온계를 통해 소중한 사람의 체온을 정확하게 측정하세요.



빠르고 편리하게 정확한 온도측정 가능



인체공학적 설계를 통한 안정된 그립감




Safety 의료기기 인증



■ 제품특징

1. 정확하고 안전한 제품

4차에 걸친 검수과정을 모두 통과한 제품만을 제작 합니다.
환경의 온도 및 습도를 일정하게 유지한 상태에서 2차에 걸쳐 온도 유지 과정을 포함, 4차에 걸친 검수과정을 진행합니다.

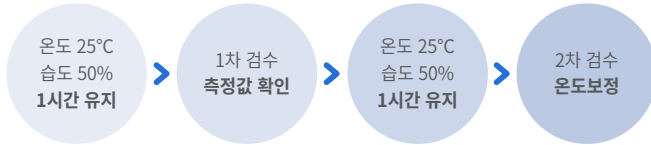

2. OLED 디스플레이

직관적인 모드 구성으로 빠르고 편리한 측정이 가능합니다.



3. 체온 측정 모드

이마 측정 시

정상 체온 범위 36.0°C ~ 37.0°C



귀 속 측정 시

정상 체온 범위 36.0°C ~ 37.0°C



■ 측정모드 위치 및 방법 안내

이마 혹은 피부에 측정 시



1. 프로브 커버를 장착해주세요
2. 체온계의 센서 부분을 이마로 향하게 해주세요
3. 체온계를 왼쪽 끝 이마에서 약 1cm 정도 떨어뜨린 상태에서 SCAN버튼을 누르세요
4. 신호음이 나면 체온계에 나타난 체온을 확인하세요

귀에 측정 시



1. 프로브 커버를 탈착해주세요
2. 1세 이하 영아 측정 시 귀를 뒤로 당기면서 측정해주세요
3. 1세 이상 측정 시 귀를 위로 당기면서 측정해주세요
4. 신호음이 나면 체온계에 나타난 체온을 확인하세요

*귀에 측정시 깊숙이 넣지 않고 측정하는것이 정확합니다.

■ 인증내역

믿고 사용할 수 있는 인증내역

CE인증, FDA인증, 의료기기 제품 및 기준 적합 인증, 의료기기 제조 인증 등



■ 제품사양

모델명	오시스 비접촉 체온계 EISI-ODT-1A
측정방식	적외선 방사 방식
측정범위/오차	36.0°C ~ 39.0°C ±0.2°C
사용환경	16°C ~ 35°C, 습도 95% 이하
측정시간	1초 이내
메모리	최대 32개 기록
제품크기	36mm(W)×49mm(D)×157mm(H)
중량	73g (배터리 불포함)
전원	DC3V / 알카라인 배터리(AAA) × 2EA
발광기능	어두운 곳 또는 수면 중인 아이 체온 측정 용이 귀 측정 모드 사용시 프로브 주위 발광
절전기능	미 사용시 자동 종료
알림	37.8~42.2°C일 때, 6번 비프음 알림 기능
원산지	Made in Korea
의료기기 제조인증 번호	제인 20-4304 호



주식회사 카스

서울특별시 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩_계측사업부

공식홈페이지 : www.cas.co.kr

제품 문의·지원 : 02 2225 3776



* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

